

和東國小高年級擴大尿液篩檢說明

- 一、操作說明影片檔公布學年 line 群組請參閱，完成請將檢驗名冊交到訓育組。
- 二、發現陽性反應學生，請先安撫學生告知還不能確定，尿液請先保存並通知訓育組前往處理。
- 三、學生生理期可以驗，但學生不想驗就不要驗再知會家長。
- 四、有時反應線顏色會比較淡，請在光線下檢視，有看到即是陰性。
- 五、使用完試劑含包裝與尿液採集杯丟入垃圾桶即可。(和美清潔隊不回收)
- 六、完成時間請在 4/15(三)前完成，務必在校實施勿讓學生帶回施作。

★節錄重要步驟，完整與影片請參閱 line 群組內容。

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>尖端醫 步驟4. 吸取檢體 (直接於尿杯中吸取檢體，沾取尿液勿高於尿液終止線)</p>  <p>尿液終止線</p> | <p>尖端醫 步驟5. 等待試劑反應 當試劑開始反應後，停留約8~10秒，即可離開尿液蓋上蓋子，將試劑平放於桌面。</p>  <p>尿液終止線</p> <p>Simi操作影片</p> |
| <p>尖端醫 步驟6. 判讀試劑結果 滴入檢體後5分鐘內即可判讀結果，並在10分鐘內判讀完畢。 ※結果判讀完畢後，若為陰性結果再將尿液丟棄※</p>   <p>尖端醫 TABP</p> | <p>結果判定 (陰性)</p> <p>MET: 甲基安非他命 KET: 愷他命 THC: 大麻 BZD: 苯二氮類 MDMA: 搖頭丸</p>  <p>尖端醫 TABP</p> |
| <p>結果判定 (測試失效)</p>  <p>無C線呈色</p> <p>尖端醫 TABP</p> | <p>結果判定 (KET K他命陽性)</p>  <p>尖端醫 TABP</p> |